



Autoclave pour stérilisation "Autester ST DRY PV" 12 Classe B

CAPACITÉ: 12 LITRES.



Conforme aux directives: 2014/68/UE équipements à pression, 3.3.

NOUVEAU DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

Chambre intérieure en acier inox.
 Purgé par vide fractionné.
 Séchage par le vide.
 Générateur de vapeur externe.
 Réservoir d'eau pour alimenter la chaudière.
 Pénétration élevée sur produits poreux.
 Utile en stomatologie, ophtalmologie, salles d'opération, etc.

SÉCURITÉ


Valve de sécurité. Pour que la pression ne dépasse pas la limite maximum.

Thermostat de sécurité. Débranche le chauffage en cas de température surélevée ou de manque d'eau dans le réservoir.

Gaine de protection thermique du couvercle.



PANNEAU DE COMMANDES

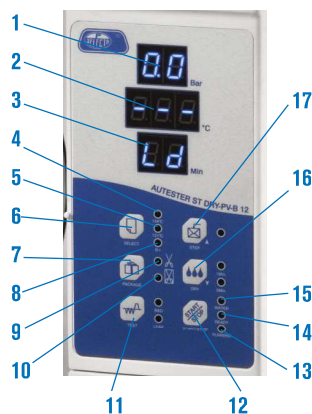

CONTROL DE TEMPERATURE ET CYCLE PAR. MICROPROCESSEUR AUTOMATIQUE.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Indicateur de pression (bar). | 10. Solides emballés. |
| 2. Indicateur de température (°C). | 11. Test. |
| 3. Indicateur de temps (min.). | 12. Préchauffage. |
| 4. 121 °C. | 13. Cycle de stérilisation en marche. |
| 5. 134 °C. | 14. Autoclave prêt pour la mise en marche. |
| 6. Sélection de programme. | 15. Indicateur niveau d'eau bas. |
| 7. Sélection emballés / non emballés. | 16. Séchage rapide (1 ou 5 minutes). |
| 8. Textiles. | 17. Maintient au chaud de la chambre. |
| 9. Solides non emballés. | |

CYCLES	134 °C Emballé	134 °C Non Emballé	121 °C Emballé	121 °C Non Emballé	Textiles	Test Bowie Dick	Test Vide
Température stérilisation	134 °C	134 °C	121 °C	121 °C	134 °C	134 °C	-
Pression de stérilisation	2,1 bar	2,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	2,1 bar	-	2,1 bar
Temps à vide	8 min.	4 min.	8 min.	4 min.	8 min.	-	-
Temps de stérilisation	12 min.	4 min.	30 min.	20 min.	12 min.	3,5 min.	10 min.
Temps de séchage	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.	15 min.	1 min.	-

MODÈLE	Code	Capacité litres	Ø / prof. cm		Extérieur cm			Étagères cm			Consom W	Poids kg
			Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.		
AUTESTER ST DRY PV B 12	4001737	12	20	35	39,2	48,7	60	1,8	14	29,5	1800	42,2



Livré avec : 1 joint de rechange, clé d'ajustage de la porte, support à 3 étagères, pince d'extraction, filtre à eau de moulage et tube de sortie d'eau.

ACCESSOIRES

Imprimante thermique.
 Papier de 2 1/4" (56 mm) de ample.
 Fourni avec câbles de communications et d'alimentation.

Code: 4120123

Distillateur d'eau spécial autoclave. (Voir page 63).

Machine à sceller (Voir page 68 et 69).

