



Compteur digital de formules sanguines "CC-1431"



CARACTÉRISTIQUES

Spécialement conçu pour tout calcul et décompte de cellules dans les analyses de sang.

Choix de la langue: espagnol, anglais ou français.

Menu affiché sur écran LCD de 4 lignes x 20 caractères.

Affichage des données partielles et totales en valeur absolue ou en pourcentage pour chaque touche.

Correction possible des dernières données introduites.

Mémorisation de la dernière touche pressée et identification à l'écran.

Contrôle sonore des touches, et avis lorsque la limite de détection est atteinte.

Connexion pour USB pour transposer les résultats sur ordinateur.

Câble de connexion inclus.

Software fourni pour mettre les données et préparer les rapports d'analyses depuis un PC avec les paramètres suivants : nom du patient, nom du laboratoire, date, heure, commentaire et comparatif des résultats avant et après traitement.

```
COUNTER LEUC
Count. Clr Esc
Total: 3 End: 100
10 Tox Gr: 1
```



QUATRE PROGRAMMES INCLUS :

LEUCO

- Comptage des leucocytes.
- 14 types de cellules différentes.
- 3 touches pour cellules dont les comptes ne s'accumulent pas au total (« 11. Normo » « 12. Tox Gr » « 14. Ery »).
- Total des cellules (fin de comptage) sélectionnable de 100 à 1000 par paliers de 100.

MYELO

- Comptage des myélocytes.
- 14 types de cellules différentes.
- Total des cellules sélectionnable de 100 à 1000 par paliers de 100.

RETI

- Comptage des réticulocytes.
- N° de cellules par champs configurable entre 50 et 250.
- 1 touche pour champs de réticulocytes.
- 1 touche pour érythrocytes que ne se cumulent pas au total.
- Total (fin de comptage) fixe en 1000.

FREE

- Comptage configurable.
- Chaque touche peut s'activer ou se désactiver pour le comptage.
- Total des cellules (fin de comptage) sélectionnable de 100 à 1000 par paliers de 100.

CLAVIER

2 touches de contrôle :

- SELECT : pour sélectionner un programme ou une option.
- ENTER : pour accepter l'option sélectionnée.
- Seg : Segments ou Granulocytes
- Eos : Eosinophiles
- Lym : Lymphocytes
- Mono : Monocytes
- Stab : Bandes
- Baso : Basophiles
- Met My : Métamyélocytes
- Myelo : Myélocytes
- At Ly : Lymphocytes atypiques
- My Bi : Myélocytes binucléés
- Normo : Normo blastes
- Tox. Gr. : Granulocytes toxiques
- Reti : Réticulocytes
- Ery : Erythrocytes / Erythroblastés

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. cm	Consom. W	Poids Kg
7121431	7 15 22	6	0,6

J.P. SELECTA, s.a.
08:45 Jun. 22, 2007 page 1
Hospital San Pedro
Nom du patient: XXX

```
"Total: 29"
" 1 Seg: 1 3,44 %"
" 2 Eos: 1 3,44 %"
" 3 Lym: 2 6,89 %"
" 4 Mono: 1 3,44 %"
" 5 Stab: 5 17,24 %"
" 6 Baso: 3 10,34 %"
" 7 Met My: 5 17,24 %"
" 8 Myelo: 1 3,44 %"
" 9 At Ly: 2 6,89 %"
"10 My Bl: 6 20,68 %"
"11 Normo: 2 "
"12 Tox Gr: 1 "
"13 Reti: 2 6,89 %"
"14 Ery: 2 "
```

Rapport obtenu.

Panel1

RESULTS

A
0 "Total: 29"
1 " 1 Seg: 1 3,44 %"
2 " 2 Eos: 1 3,44 %"
3 " 3 Lym: 2 6,89 %"
4 " 4 Mono: 1 3,44 %"
5 " 5 Stab: 5 17,24 %"
6 " 6 Baso: 3 10,34 %"
7 " 7 Met My: 5 17,24 %"
8 " 8 Myelo: 1 3,44 %"
9 " 9 At Ly: 2 6,89 %"
10 "10 My Bl: 6 20,68 %"
11 "11 Normo: 2 "
12 "12 Tox Gr: 1 "
13 "13 Reti: 2 6,89 %"
14 "14 Ery: 2 "

PRINT
RESET

Laboratory name: Hospital San Pedro
Patient name: Nombre del paciente: XXX
Note:
Índice elevado de Estab y My Bl.
Sin cambios respecto al anterior.

CC-1431 v04
J.P. SELECTA, s.a.

Software pour décharge et confection du rapport.